

# VS Flexi Gliders Blue - инструкция за употреба

## Описание

Това са никел титанови пили с контролирана памет. Те имат изключителна торзионна устойчивост и отлична гъвкавост.

Блистерът съдържа два комплекта пили – общо 6 броя. Всеки комплект се състои от две машинни пили за гладък път (съответно размери #14.03 и #17.03 ) и една пила за първична обработка на канала с размер #20.04.

## Начин на употреба

Всички пили работят с нормална ротация на 360 градуса по часовниковата стрелка. Скоростта трябва да е 250 об/мин, а торкът - 2.2 N/cm.

Преди да се започне работа с машинните пили **VS Flexi Gliders Blue** трябва ръчно да се оформи гладък път до размер #08.02

След това с **VS Flexi Gliders Blue** се оформя машинно гладък път последователно с пилите с размери #14.03 и #17.03. Продължава се с първична обработка на канала на работна дължина с пилата с размер #20.04.

Когато това разширение на канала е постигнато може да се пристъпи към запълване на канала с единичен гутаперчов щифт с размер #20.04 и биокерамичен сийлър.

Ако се прецени, че конкретният коренов канал изисква по-голямо разширение от #20.04 се използват пили **VS Flexi** с по-голям размер. При анатомично по-широки канали обработката може да продължи и с пили **VS Flexi .06 Blue**, които са с тейпър 06, до достигане на желания финален размер на обработка на канала.

Запълването на канала може да се направи със съответния размер единичен гутаперчов щифт и биокерамичен сийлър.

Производител:  
**Shenzhen Rogin Medical Co., Ltd**  
5th Floor, Block I, Jinchangda Science Park,  
Zhangkengjing, Guanian, Longhua Shenzhen  
China

Вносител:  
**Валдентал – ООД**  
Тел: 0886 696 499, 0886 696 399  
Бул. "Русе" 87-А-3  
Плевен

**CE**  
**0197**